

Dr. Schicks Zeckenkammkarte®

1 Zeckenkarte

Je nach Zeckengröße eine der 3 Einkerbungen hautnah unter die Zecke schieben, Karte leicht anheben und weiterschieben, so löst sich die Zecke leicht von der Haut.

Hinweise: Kein Öl oder andere Substanzen auf die Zecke auftragen. Festgesogene Zecken sollten baldmöglichst entfernt werden, da mit der Dauer des Saugaktes die Infektionsgefahr steigt. Es sollten alle Teile der Zecke entfernt werden, um eine Entzündung oder Infektion zu vermeiden. Nach Entfernung der Zecke sollte die Stichstelle und die Zeckenkammkarte mit 70 % Alkohol desinfiziert sowie das Datum des Zeckenstichs notiert werden. Bei Anzeichen einer Infektion, z.B. Rötungen, Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein oder grippeähnliche Symptome, muss unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.



2 in 1
Doppelfunktion

Floh-, Läuse- und Zeckenkamm 2

Zecken, Flöhe, Läuse aus dem Haar/Fell kämmen. **Vorsicht:** Zecken können vom Tierfell leicht auf den Menschen übergehen.



UDI-DI 4016353010166



Dr. Schick GmbH
74889 Sinsheim



LOT
1020



Apothekenvertrieb:
inkosmia GmbH & Cie. KG
35576 Wetzlar



2040-03-02

CE

MD



4 016353 010166

 **Dr. SCHICK**
GMBH

Zeckenkammkarte®

Einfache Entfernung von Zecken
3 verschieden große Haken mit integriertem Kamm

2 in 1



PZN - 06092397

Made in Germany

patentiert - DE 10 2007 045 105