



Vorsicht Zecken

mit Dr. Schick`s

Zecken-Zange

entfernen Sie ganz
einfach diese
gefährlichen

Plagegeister:

**Knopf drücken Zange
möglichst hautnah
anlegen und Zecke
herausdrehen**

(ca. 2-3 Umdrehungen)

made in Germany

www.zecken-zange.de



Bei der Entfernung kein Öl usw. verwenden, da sonst erhöhte Infektionsgefahr besteht, Stichstelle desinfizieren.

Wenn nach Zeckenstich eine Hautrötung von mehr als 3 cm Durchmesser erscheint oder grippeartige Allgemeinsymptome auftreten, bitte den Arzt konsultieren.



D-74889 Sinsheim



Reclay

LOT 1615



PZN -3741375